

# Jeringa desechable con transpondedor 3x15 mm para identificación de équidos



## Instrucciones de uso

Este proceso de implantación tan solo puede ser realizado por personal veterinario cualificado. Recuerde que está manejando material esterilizado: no abra la bolsa de la jeringa hasta el momento justo de la implantación.


**PASO 1.** Comprobar que el animal no disponga ya de un transpondedor (identificador electrónico). Se deberá realizar un barrido amplio por el cuello del animal con un lector apropiado.



**PASO 2.** Antes de abrir la bolsa de la jeringa, realizar la lectura del transpondedor para comprobar que éste funciona correctamente y verificar que el código que aparece en la pantalla del lector coincide con el código de la etiqueta.

**PASO 3.** Desinfectar la zona de implantación del transpondedor.

**PASO 4.** El transpondedor se implantará por vía parenteral en el tercio superior del lado izquierdo del cuello, entre la nuca y la cruz en la zona del ligamento nucal, tal como se establece en el RD 1515/2009.

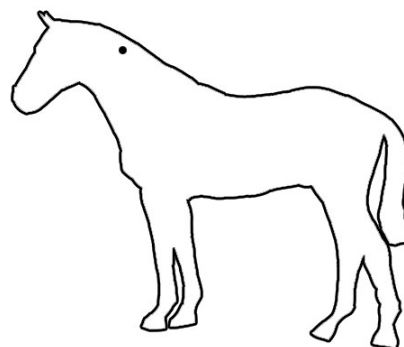

La posición de la jeringa será perpendicular a la tabla del cuello. Se deberá introducir toda la cánula y después apretar sobre el émbolo hasta el final de su recorrido. Retirar la jeringa y presionar durante unos segundos con un algodón empapado en desinfectante, en la zona de la punción.

**PASO 5.** Comprobar que el transpondedor está bien implantado, realizando la lectura del mismo.

